

Проведение отбора проб с использованием набора для взятия проб на энтеробиоз:

1. Взятие материала необходимо производить утром до дефекации и проведения гигиенической обработки половых органов.
2. Отбор образца осуществляется путем прикладывания шпателя плоской клейкой стороной (рабочим концом со стороны рельефного логотипа) к коже перианальных складок в положении лежа на боку, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу.

Осуществляющий забор материала шпателем должен визуально контролировать место забора. Недопускается загрязнение шпателя каловыми массами.

3. После забора материала поместить шпатель рабочим концом вниз в предварительно промаркированный контейнер с завинчивающейся крышкой (указать ФИО и дату рождения) для транспортировки в лабораторию.



Условия хранения и транспортировки:

До отправки контейнер с биоматериалом должен храниться в холодильнике при $+2...+8^{\circ}\text{C}$. Доставить в лабораторию необходимо в день сбора в охлажденном, но не замороженном виде при температуре $+2...+8^{\circ}\text{C}$ (например, в термосе с кубиком льда или пакете с хладоэлементами).